


# Dale-abdominaalituki

## Käyttöohjeet

### Pukemisohje

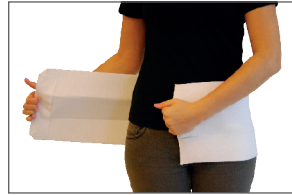

1. Aseta tuki siten, että sen keskisauma on selkärangan kohdalla. Tuen yläreunan tulee olla juuri navan alapuolella. Venytä tukea ulospäin
2. Vedä tuen vasen reuna kohti vartalon keskiosaa.
3. Kiinnitä tuki sen Velcro-tarra-kiinnityksellä.

### Pesuohteet

40-60

Konepesu 40-60° asteessa ei vahingoita tuotteen toiminnallisia ominaisuuksia, kun tarrakiinnitys on paikoillaan ja käytät mietoa pesuainetta.



30

Käsinpesu tai hienopesu 30° asteessa turvaa tuelle mahdollisimman pitkän käyttöiän.



Kloorivalkaisu kielletty



Ripustuskuivaus

Huom! Aseta tarrakiinnitys paikoilleen ennen pesua tarran nukkaantumisen estämiseksi.

*kun hoitotulokset ratkaisevat*

**Steripolar**

Puh. 09 417 606 00 | [www.steripolar.fi](http://www.steripolar.fi) | ISO 9001:2008 ISO 14001:2004