

Nursicarella turvaat ja edistät imetystä

Nursicare – hoitava rintasidos



Steripolar

Taking care further

Olemme suomalainen terveysteknologiayritys, joka tarjoaa julkiselle ja yksityiselle terveydenhuollolle tuotekehityksen kärjessä olevia, innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita sekä uusia hoitomenetelmiä. Meitä ohjaa tavoite paremmasta potilashoidosta ja potilaan nopeammasta paranemisesta. Olemme toimineet jo vuodesta 1985 ja toteutamme joka päivä työssämme **Taking care further** -arvolupausta.

Rikkonaisista ja kipeistä rinnanpäistä kärsii jopa joka kolmas imettävä äiti


Imetystä suositellaan jatkettavan vähintään yhden vuoden ikään asti (Suomen sosiaali- ja terveysministeriö). Rikkonaisista ja kipeistä rinnanpäistä kärsii joka kolmas äiti. Imetyksessä alun haasteet ovat kuitenkin voitettavissa. Hyvän imuotteen huomiointi on tärkeää koko imetyksen ajan. Jos imetys on kivuliasta, syynä voi olla huono imuote. Jos imetys sattuu, apua ja imetysohjausta on saatavilla mm. synnytysairaalaista ja neuvolasta. Lue lisää imetyksestä www.imetys.fi.

Vastasyntyneen kanssa kiireetön, lapsentahtinen imetys ihokontaktissa helpottaa hyvän imuotteen löytämistä. Hyvän imuotteen perusta on hyvä imetysasento, joka mahdollistaa vauvalle pään taivuttamisen taakse ja suun avaamisen ammолleen. Kun vauvan ottaa rinnalle, hyvä muistisääntö on "maha maha vasten" ja "nenä ja nänni kohdakkain".

Hyvällä imuotteella on kaksi keskeistä mittaria: vauva saa tehokkaasti maitoa ja imetys ei satu. Hyvässä imuotteessa vauvan pää on hieman takakenossa, imuote on mahdollisimman laaja, rinnanpää on syvällä vauvan suussa ja voit kuulla nielemisääniä. Imetysvälien pidentäminen kivun ja rintojen haavaumien vuoksi voivat altistaa rintatulehdukselle.

Hyvän imuotteen lisäksi on tärkeää hoitaa jo syntynyt haava huolellisesti pitämällä se puhtaana ja sopivan kosteana. Oikealainen hoito nopeuttaa paranemista estämällä haavan rupeutumisen.

Lähde: imetys.fi

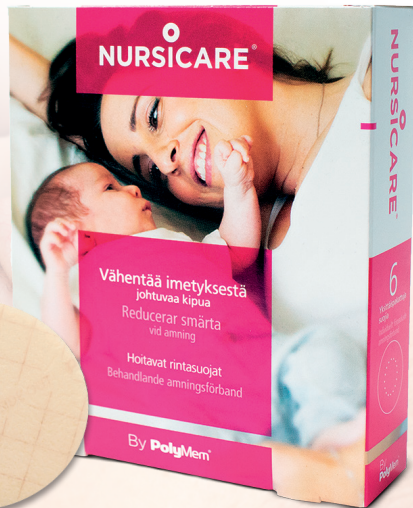

Nursicare – hoitava rintasidos

Nursicare-sidokset turvaavat ja edistävät imetystä ja sen jatkumista, parantamalla ja ylläpitämällä rinnanpäiden hyvää kuntoa. Nursicare yhdessä oikean imuotteen kanssa lievittää kipua ja tukee haavan paranemista.

Kivunlievitys

Nursicaren on kliinisesti todistettu vaimentavan kipusignaaleja vähentämällä yliaktiivisten hermosolujen herkkyyttä.

Nopea paraneminen

Nursicare tarjoaa optimaaliset olosuhteet ihon paranemiseen, estää hankausta ja ylläpitää alueen puhtautta ja ehkäisee infektoita.

Turvallinen äidille ja lapselle


Nursicare-sidokset sisältävät lapselle turvallisia ainesosia, jotka täyttävät kaikki asianmukaiset kansainväliset turvallisuusstandardit. Ei sisällä lääkkeitä tai muita haitallisia ainesosia ja sopii myös villa- ja lanoliiniallergisille.

- Pinta-aktiivinen puhdistava ainesosa
- Glyseriini, pitää ihon kosteana ja estää sidosta tarttumasta kiinni
- Superabsorbentti imee ja sitoo eritteen ja maidon sidoksen sisään

Nursicaren turvalliset ainesosat aktivoituvat äidinmaidosta, käynnistäen paranemisprosessin.

Superabsorbentti imee ja sitoo eritteen ja maidon sidokseen

Nursicare-sidos turpoaa ja täyttää haavapohjan

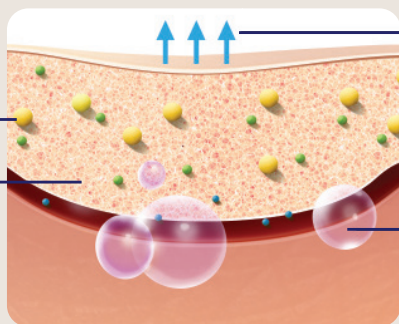

Ylimääräinen kosteus poistuu sidoksesta, säilyttäen sopivan kosteustasapainon haavalla

Puhdistava ja kosteuttava ainesosa vapautuvat sidoksesta haavapohjalle

● Superabsorbentti

● Puhdistava ainesosa

● Kosteuttava ainesosa, glyseriini

Nursicare ja kivunlievitys

Nursicaren käyttö vähentää kipulääkityksen tarvetta. Nursicare-rintasidos perustuu PolyMem-haavasidoksiin, jotka ehkäisevät inflammaatioreaktion leviämistä ympäröiviin kudoksiin, joka aiheuttaa kudosturvotusta, mustelmia ja kipua.

Nursicare-sidokset vaikuttavat kipureseptoreiden toimintaan vähentäen Na-ioneja kapillaarisesti iholta ja ihonalaisesta kudoksesta. Tämä vaimentaa kipusignaalin kulkua, joka osaltaan voi selittää havaitun kivun vähenemisen.


Nursicare-sidokset vähentävät sidosten vaihdon yhteydessä syntyvää kipua haavalla, sillä ne eivät tartu kiinni haavapohjaan sidoksessa olevan glyseriinin ansiosta.

Nursicare-sidokset vähentävät mekaanisen puhdistuksen tarvetta, sillä ne irrottavat katetta haavapohjalta. Sidoksessa oleva pinta-aktiivinen aine hakeutuu aktiivisesti haavakatteen ja haavapohjan väliin.




Helppokäyttöinen

1

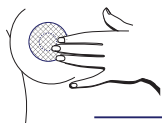


Aseta Nursicare-rintasidos liivien alle,
kuvioitu puoli pois päin iholta.

2

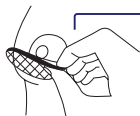


Aseta Nursicare-rintasidos imetyksen ajaksi
puhtaalle tasolle kuvioitu kalvopuoli alaspäin.

3

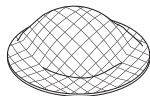

Voit käyttää sidosta useita kertoja, kunnes erite tulee
näkyviin kuvioidun taustakalvon lävitse ja/tai sidoksen
sitoma maito saavuttaa sidoksen ulkoreunat.

*Ole hyvä ja lue pakkauksen mukana tullut käyttöohje ennen
Nursicare-rintasidoksen käyttöönottoa.

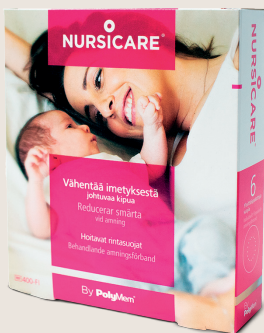

Lisää tietoa Nursicaresta osoitteessa

www.nursicare.fi


Nursicare-jälleenmyyjät

www.bit.ly/nursicaremyyja

Hoitotapauksia

Hoidon aloituspäivä



 Kipuskaala - 10

1. päivä



 Kipuskaala - 3


4. päivä. Hoito lopetetaan



 Kipuskaala - 0

Hoidon aloituspäivä



 Kipuskaala - 10

2. päivä



 Kipuskaala - 1


3. päivä. Hoito lopetetaan



 Kipuskaala - 0

Hoidon aloituspäivä



 Kipuskaala - 7

3. päivä



 Kipuskaala - 2


5. päivä. Hoito lopetetaan



 Kipuskaala - 0

Hoidon aloituspäivä



 Kipuskaala - 8

3. päivä



 Kipuskaala - 2

7. päivä. Hoito lopetetaan



 Kipuskaala - 0

Nursicare-sidoksen glyseriini vetää kudokset ja sen mukana ravintotekijöitä haavan pintaan ja pehmentää katetta. Pinta-aktiivinen puhdistava ainesosa hakeutuu katteen ja haavapohjan väliin.

**Hoitavat Nursicare-
rintasidokset on suunniteltu
vähentämään imetyksen
alussa koettua kipua, sillä kipu
ei saisi aiheuttaa ongelmia
äidin ja vastasyntyneen välille.
Nursicare rauhoittaa ja lievittää
imetykseen liittyvää kipua ja
parantaa rikkinäiset ja arat
rinnanpääät nopeasti.**


NURSICARE[®]
freeing moms to be moms

www.nursicare.fi

Nursicare-jälleenmyyjät
www.bit.ly/nursicaremyyja



MKL-714 RI 1116

Nursicare turvaa ja edistää imetystä. Imetys kuuluu kaikille.

Lähde: Imetyksen tuki ry, imetyksen tuen strategia 2026–2030

<https://imetys.fi/yhdistys/ajankohtaista/imetyksen-tuen-strategia-2025-2030-imetys-kuuluu-kaikille/>



Steripolar

Taking care further

Ota yhteyttä

steripolar@steripolar.fi
Asiakaspalvelu klo 8.00–16.00
+358 (0)9 417 606 00

steripolar.fi

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485