


PolyMem® käyttöohjeet

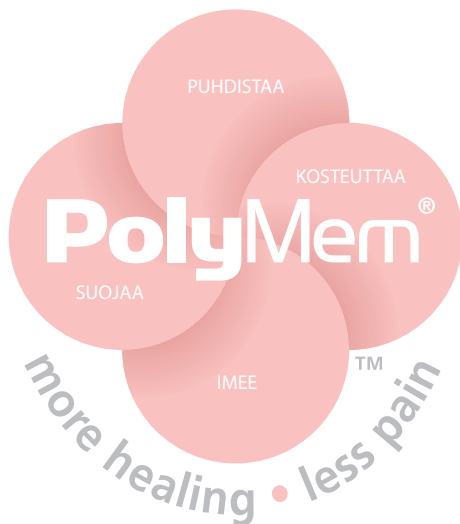

operäiset • Säärihaavat • Painehaavat • Palovammat • Ihorikot • Kirurgiset haavat • Traumaat

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00 | www.steripolar.fi | ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

PolyMem -sidokset

INDIKAATIOT

- Painehaavat I-IV
- Säärihaavat
- Diabeettiset haavat
- Ihonotto- ja siirtokohdat
- I-II° palovammat
- Kirurgiset haavat
- Ihorikot
- Rakot

KONTRAINDIKAATIOT

- III° palovammat
- Allergia tuotteen jollekin aineosalle
- Yhteiskäyttö hypokloriittiliuosten kanssa

PolyMem Silver -sidokset

INDIKAATIOT


- Infektioituneet haavat

KONTRAINDIKAATIOT

- Allergia tuotteen jollekin aineosalle esim. hopealle

HOIDON ALOITTAMINEN

1. Hoitoa aloitettaessa puhdista haava huolellisesti mahdollisista muiden tuotteiden jäämistä.
2. Leikkaa valitusta sidoksesta oikean kokoinen kappale, 1 - 2 cm haavaa suurempi.
3. Mikäli haavaeritys on niukkaa tai haavapohja on kuiva, laita sidoksen keskiosaan muutama tippa juomakelpoista vettä, keittosuolaliuosta tai aquaa. Sidos vaatii kosteutta aktivoituakseen. Erittävissä haavoissa kostutusta ei tarvita.
4. Aseta PolyMem -sidokset aina tekstipuoli (polyuretaanifilmi) ulospäin haavalta.
5. Kiinnitä sidos tilanteeseen sopivalla tavalla: ihoteipillä, sideharsolla, haavakalvolla tai putkisidoksella. PolyMem valikoimasta löytyy myös muotoiltuja, kiinnityskalvon omaavia sidoksia.

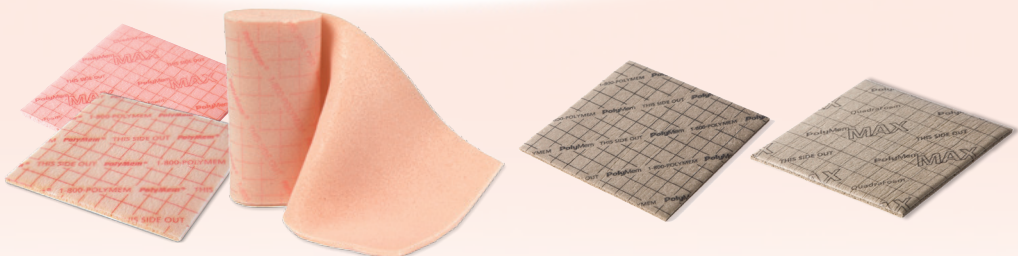

SIDOKSEN VAIHTAMINEN


1. **PolyMem** ja **PolyMem Silver** -sidokset vaihdetaan, kun haavaerite on värjännyt sidoksen pinta-alasta on n. 75 %. Värimuutoksesta on helppo tarkkailla ja määritellä sidoksen vaihdon tarve. Sidos saa olla haavalla enintään 7 vrk.

PolyMax ja **PolyMax Silver** -sidokset ovat jopa 60 % imukykyisempiä versioita PolyMem-sidoksista. Sopivat erinomaisesti voimakkaasti erittävälle haavaille. Taustakalvo haihduttaa tehokkaasti kosteutta sidoksesta.

Palovammoissa, diabeetikoilla sekä potilailla, joiden immuunisuoja on heikentynyt, **PolyMem** -sidoksen vaihtoväli suositus on 1 x vrk. Myös infektoituneen haavan hoidon alkuvaiheessa **PolyMem Silver** -sidoksen vaihtoväli on 1 x vrk.

HUOM! PolyMem -sidokset lisäävät erityksen määrää ensimmäisinä hoitopäivinä glyseriinin hydroskooppisen vaikutuksen vuoksi.

2. Haavaa ei tarvitse välttämättä huuhdella tai puhdistaa mekaanisesti sidosvaihtojen yhteydessä, koska kaikissa PolyMem -sidoksissa on puhdistava ja kostuttava aineosa.
 3. Tarkasta haavapohja ja ympäröivän ihon kunto ja aseta uusi PolyMem -sidos haavalle. Vertaa haavan kokoa ja eritystä aikaisempaan ennen kuin leikkaat uuden sidoksen. Ympäröivää ihoa voi tarvittaessa perusrasvata ja/tai suojata esim. Medihoney Barrier Creamilla tai Medihoney Derma Creamilla.
 4. Sidosta ei tarvitse poistaa suihkun ajaksi (ellei vaihto muuten ajan-kohtainen), vaan sen voi suojata kastumiselta esim. haavakalvolla.
- Säilyttäminen: Kuivassa ja huonelämmössä, alle +25 °C, valolta suojattuna.

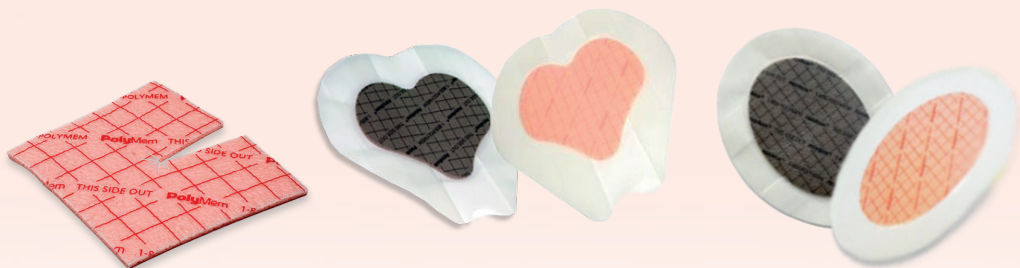

PolyWic -sidos

INDIKAATIOT

- syvät onkalomaiset haavat

KONTRAINDIKAATIOT

- fistelimäiset haavat

PolyWic Silver -sidos

INDIKAATIOT

- infektoituneet syvä- tai onkalohaavat.

KONTRAINDIKAATIOT

- fistelimäiset haavat
- allergia tuotteen jollekin aineosalle esim. hopealle

PolyWic Silver Rope -sidos

INDIKAATIOT

- painehaavat (vaiheet III-IV)
- verisuonihaavat
- diabeetikon haavat
- akuutit haavat
- fistelimäiset haavat

KONTRAINDIKAATIOT

- allergia tuotteen jollekin aineosalle esim. hopealle

HUOM! **PolyWic** -sidos vaatii päällelleen suojaavan pintahaavasidoksen.

HUOM! **PolyWic Silver** -sidoksessa oleva pienhiukkasista hopeaa on lukittuna sidokseen. Hopea ei vapaudu haavapinnalle eikä sidos värjää ihoa.


Haavan infektion parantuessa siirry käyttämään PolyWic onkalo-/ syvähaavasidosta.

KÄYTTÖOHJE:

1. Hoitoa aloitettaessa puhdista haava huolellisesti mahdollisista muiden tuotteiden jäämistä.
2. Valitse haavaa hieman pienempi sidos. Sidokselle pitää jäädä pieni turpoamisvara sivusuuntaan sen imiessä haavaeritettä itseensä.

PolyWic Silver Rope -sidosta voi leikata tarvittaessa kahtia pituussuunnassa, sen päissä olevia halkioita apuna käyttäen. Jätä riittävästi sidosta tunnelin ulkopuolelle, jotta se on helppo poistaa. Ylimääräinen sidos voidaan taittaa, kietoa rullalle tai leikata jäljellä olevan haava-alueen täyttämiseksi.

3. Varmista, että sidos on kosketuksissa haavan pohjan kanssa.
 4. Runsaasti erittävissä haavoissa sidos vaatii imevän pintahaava-sidoksen.
 5. Vähän erittävässä haavassa peittosidokseksi sopii esim. polyuretaanikalvo.
 6. PolyWic -sidokset saavat olla haavalla enintään 7 vrk.
 7. Poista sidos varovasti nostaen ja arvioi haava ja ympäröivä iho. **PolyWic Silver Rope** tulee poistaa nostamalla tai vetämällä varovasti käsin tai leveäkärkisillä pihdeillä. PolyWic sidokset eivät tartu haavaan mahdollistaen näin kivuttoman sidoksen vaihdon.
 8. Aseta uusi sidos paikoilleen. Haavaa ei tarvitse välttämättä huuhdella tai puhdistaa mekaanisesti sidosvaihtojen yhteydessä, koska kaikissa PolyMem -sidoksissa on puhdistava ja kostuttava aineosa.
- PolyWic -sidokset ovat pääasialliset sidokset. Suojaa ne asianmukaisella toissijaisella sidoksella.
 - PolyWic -sidokset lisäävät erityksen määrää ensimmäisinä hoitopäivinä glyseriinin hydroskooppisen vaikutuksen vuoksi. Koska puhdistava aine (F68) irrottaa kuollutta kudosta haavapohjasta, haava voi näyttää suuremmalta hoidon alussa.
 - Säilyttäminen: Kuivassa ja huonelämmössä, alle +25 °C, valolta suojattuna.

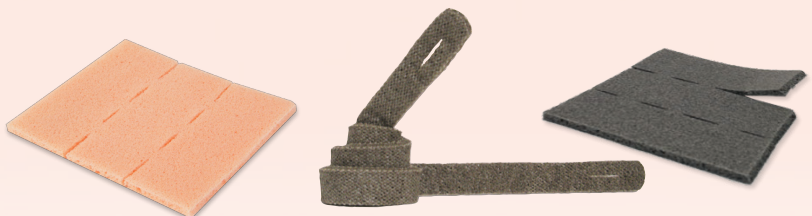


PolyMem® sormi/varvassidos

INDIKAATIOT

- painehaavat (vaiheet I-IV)
- Ihonotto- ja siirtokohdat
- diabeetikon haavat
- I-II° palovammat
- akuutit haavat
- ihorepeämät
- dermatologiset haavat

1. Hoitoa aloitettaessa puhdista haava huolellisesti.
2. Kiinnitä sidos alla olevien kiinnitysohjeiden mukaisesti. Sidoksen tulee peittää myös haavakohtaa ympäröivä tulehtunut tai vaurioitunut alue. Sidosta voidaan leikata.
3. Kiinnitä sidos kalvopuoli ylöspäin (teksti ulkopuolella).
4. Kiinnitä sidos vesitiiviillä teipillä siten, että se estää sidoksen sisäpuolen kastumisen.

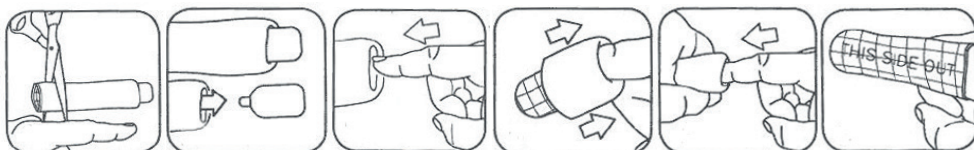


KIINNITYSOHJEET

1. Mittaa sidos sormen pituuteen sopivaksi. Leikkaa tarvittaessa sidos lyhyemmäksi sen avoimesta päästä.
2. Poista sidoksessa oleva muoviläppä.
3. Aseta sormi sidoksen rullalla olevaan päähän.
4. Ala rullata sidosta sormen ympärille.
5. Sidoksen tulisi asettua tasaisesti sormen ympärille. Sen ei tulisi olla liian löysä tai kireä.

PolyMem® sormi/varvassidos



Sidos voidaan kiinnittää eri tavoin. Kun se sidotaan varpaaseen, sivut voidaan leikata ja muodostaa läpät varpaan päälle ja alle. Nämä voidaan kiinnittää teipillä. Sidos voidaan leikata myös renkaaksi, jolloin se peittää sormessa tai varpaassa olevan haavan.

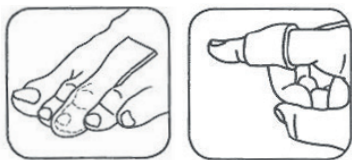


- PolyMem -sidokset lisäävät erityksen määrää ensimmäisinä hoitopäivinä puhdistavan (F68) aineen ansiosta. Tämän vuoksi normaalin paranemisprosessin aikana haava voi näyttää suuremmalta muutaman ensimmäisen sidoksen vaihdon aikana.
- Haavaeritteen näkee PolyMem -sidoksen lävitse. Vaihda sidos ennenkuin neste saavuttaa haavareunat tai enintään 7 päivän kuluttua. Jos sidos on täysin vettynyt, vaihda se välittömästi.
- Säilyttäminen: Kuivassa ja huonelämmössä, alle +25 °C, valolta suojattuna.



PolyMem® haavakartta

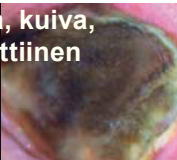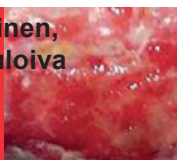Haava-alue	Kuiva tai erittävä	Infektoitunut	Huomioitavaa
Musta, kuiva, nekrottiinen 	PolyMem		Huomioitava haavan diagnoosi. Korkeintaan 7 vrk.
Keltainen, katteinen 	PolyMem	PolyMax	Korkeintaan 7 vrk. Mikäli haavapinta on kuiva, kostuta sidos tipalla vettä.
Punainen, granuloiva 	PolyMem	PolyMax	Korkeintaan 7 vrk. Mikäli haavapinta on kuiva, kostuta sidos tipalla vettä.
Vaaleanpunainen, epitelisoiva 	PolyMem		Korkeintaan 7 vrk. Mikäli haavapinta on kuiva, kostuta sidos tipalla vettä.
Infektoitunut 	PolyMem Silver	PolyMax Silver	Korkeintaan 7 vrk.
Onkalo/ syvähaava 	PolyWic	PolyWic tai infektoituneelle haavalle PolyWic Silver tai PolyWic Silver Rope	PolyWic PolyWic Silver PolyWic Silver Rope Korkeintaan 7 vrk.

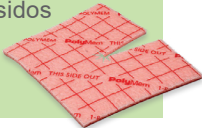Haava-alue	Kuiva tai erittävä	Infektoitunut	Huomioitavaa
Sacrumalue 	PolyMem Shapes Sacral	PolyMem Shapes Silver Sacral	Korkeintaan 7 vrk.
Kynärpää, polvi, kantapää 	PolyMem Shapes Oval	PolyMem Shapes Silver Oval	Korkeintaan 7 vrk
Trakeostomia- dreenisidos 	PolyTube		Korkeintaan 7 vrk
Sormi- ja varvassidos 	PolyMem sormi- ja varvassidos	PolyMem Silver sormi- ja varvassidos	Korkeintaan 7 vrk.

Muotoillut sidokset anatomisesti vaikeiden alueiden haavojen hoitoon.
Helppo asettaa paikoilleen!

PolyMem-haavasidosten hyödyt

POTILAALLE

- PolyMem-sidoksella vaikutat potilaan tuntemaan haavakipuun^{1,2} vähentävästi
- Voi vähentää kipulääkkeiden ja antibioottien tarvetta
- PolyMem-sidosten käyttö aktivoi haavapohjaa ja vähentää haavan kroonistumisen riskiä



HOITAJALLE

- Vähentää haavan mekaaniseen puhdistukseen käytettävää aikaa
- Parantaa potilaan hoitoon sitoutumista
- Helppokäyttöinen sidos sekä helppo vaihtotarpeen tunnistus
- Haavanhoito yhdellä sidoksella: parantaa, puhdistaa, sitoo eritteen ja vähentää kipua

HOITOYKSIKÖLLE


- Pienet pakkauskoot
- Nopea toimitus Espoon varastoltamme
- Saatavilla oleva tuotetuki






PolyMem on haavasidos, jossa yhdistyvät kaikki haavanhoidon osa-alueet. Sidos sisältää pinta-aktiivisen haavanpuhdistajan (F68), glyseriiniä, joka säilyttää haavan kosteuden myös ennaltaehkäisten sidoksen tarttumista haavaan. Superabsorboiva tärkkelys antaa sidokselle tehokkaan imukyvyn ja sidoksen puoliläpäisevä, hengittävä taustakalvo estää bakteerien leviämisen.

PolyMem sidos imee 10 kertaa oman painonsa haavaeritettä. Hyvä perussidos kaikille haavatyypeille.

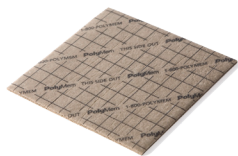

PolyMem Silver -sidokset sisältävät pienhiukkasista hopeaa ja niitä suositellaan käytettäväksi, kun haava näyttää parantuvan hitaasti, kun haavassa esiintyy tulehduksen merkkejä, kun mikrobien määrä on lisääntynyt tai kun potilaalla esiintyy tulehduksen riskitekijöitä. Hopeapartikkelit ovat lukittuna sidoksen sisään, eivätkä ne liukene haavalle tai värjää ihoa harmaaksi.

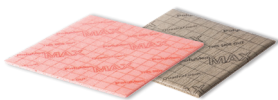

PolyMax ja PolyMax Silver -sidokset ovat jopa 60 % imukykyisempiä versioita PolyMem ja PolyMem Silver -sidoksista. Sopivat erinomaisesti voimakkaasti erittävälle haavalle.



PolyWic syvähaavasidokset ilman taustakalvoa imevät jopa 20 kertaa oman painonsa verran haavaeritettä.

PolyWic Silver ja PolyWic Silver Rope hopeasidokset sisältävät pienhiukkasista hopeaa. Hopeapartikkelit ovat lukittuna sidoksen sisään, eivätkä ne liukene haavalle tai värjää ihoa harmaaksi.



PolyTube on valmiiksi muotoiltu trakeostomia- ja dreenisidos.



PolyMem ja PolyMem Silver muotoilluissa sidoksissa on valmis silikoni- tai kalvotarrakiinnitys ja ne soveltuvat hyvin hankalissa paikoissa olevien haavojen hoitoon.



PolyMem ja PolyMem Silver -sormi-varvassidokset ovat valmiiksi muotoiltuja sidoksia, jotka on helpoo asettaa paikalleen.

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

| www.steripolar.fi

| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

2/2021